

Autoclave de Bancada PRESTO



8 Litros



SISTEMA DEDICADO DE ESTERILIZAÇÃO RÁPIDA E SEGURA.

A Autoclave de Bancada PRESTO confere elevado nível de produtividade, esterilizando materiais embalados em apenas 35 minutos para atender com segurança às demandas das áreas de esterilização. Além disso, possui ciclo de emergência de 14 minutos para materiais desembalados.

IDEAL PARA:

LOCAIS COM ALTO
FLUXO DE CIRURGIAS DE
PEQUENO PORTE.

ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS PARA
PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS,
OFTALMOLÓGICOS OU ESTÉTICOS DE
PEQUENO PORTE.

CICLOS RÁPIDOS DE ARTIGOS
MÉDICOS EMBALADOS QUE
ATENDAM À NORMA EN 13060, NA
CATEGORIA CLASS B.

Autoclave de Bancada PRESTO

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

• Velocidade

Ciclos de esterilização com duração de 14 minutos (ciclos de emergência - sólidos desembalados) a 35 minutos (embalados) com segurança e rastreabilidade. A rapidez e eficiência das autoclaves Cisa permitem que as tarefas diárias sejam cumpridas de acordo com a demanda da área de esterilização, de forma prática e segura.

• Versatilidade e rastreabilidade

- Programação e armazenamento de ciclos para cargas embaladas e desembaladas a 121 °C e 134 °C.
- Programação específica para ciclos PRION.
- Realização de ciclos teste: Bowie & Dick e Teste de Hermeticidade (de acordo com EN 13060 – perda máxima de 0,13 kPa/min).
- Armazenamento dos últimos 9.999 ciclos realizados e acessados diretamente pela interface da operação.
- Todo o processo é registrado em impressora a papel e também conta com entrada USB para coleta de dados de ciclos a qualquer momento.

• Segurança

Seja para o operador, por meio de dispositivos de segurança confiáveis, para o processo, realizado por ciclos rastreáveis e validados ou da carga, com secagem completa e eficiente. A segurança está em todas as etapas.

• Tecnologia

Pensada para atender demandas específicas de cargas pequenas e de alta demanda, as Autoclaves de Bancada PRESTO possuem gerador de vapor, bomba de vácuo e válvulas de alta performance, aliados a um sistema de controle preciso e confiável.

• Eficiência energética

A câmara da autoclave possui revestimento térmico para garantir melhor conforto e economia de energia, uma vez que o calor dissipado é reduzido pelo revestimento.

Você sabe o que é uma autoclave Class B?

A norma europeia de código EN 13060 classifica os pequenos esterilizadores em 3 categorias:



Class B: para a esterilização de materiais embalados ou não, com lúmens, porosos e sólidos. Com embalagens simples ou duplas.

Class S: para materiais sólidos desembalados e pelo menos um dos itens da Class B.

Class N: para a esterilização de materiais sólidos desembalados.

Entre os requisitos básicos de segurança de uma Class B para estes tipos de carga estão: ciclos teste de vácuo no sistema de controle com erro abaixo de 0,13 kPa/min; entrada independente de qualificação térmica; dreno deve ser resfriado abaixo de 100 °C; determina limites de variação de temperatura na qualificação térmica; ênfase em cargas embaladas às quais a secagem deve ser completa.



DIMENSÕES

INTERNAS	Diâmetro de 170 mm x 320 mm de profundidade.
EXTERNAS	Largura: 420 mm x altura: 370 mm x profundidade: 525 mm.
RACK INTERNO	130 mm de largura x 265 mm profundidade, 2 prateleiras.
VOLUME	8 litros.



We care about life

www.cisabrasile.com.br

Saiba mais:



www.cisabrasile.com.br/produtos/hospitalar/esterilizadores/bancadapresto

As informações contidas nesta lâmina poderão sofrer alterações sem aviso prévio. Imagens ilustrativas. CISA001/MAI2021.