



TREND[®]
Medical

HF3
Heated Humidifier

Registro ANVISA: 81628579011

Alimentação Elétrica

Tensão	100 – 240V ~ (fonte Full Range – comutação automática)
Corrente	0,7A – 1,5A
Frequência	50Hz – 60Hz
Fusível	T3AL 250V
Potência de Aquecimento	150W
Filamento de Aquecimento	24 ± 5 Vdc, 2,5 A Máx

Modos de operação

Modo	Controle de temperatura
Modo Invasivo	Via Aérea: Padrão: 37°C Saída da Câmara: 33°C a 42°C
Modo Não Invasivo	Via Aérea: Padrão: 34°C Faixa de Ajuste: 28°C a 39°C Saída da Câmara: 30°C a 37°C
Modo Manual	5 níveis de temperatura

Alarmes - Sonoro e Visual

Alarme de Alta Temperatura	≥ 43°C (saída da câmara) ≥ 41°C (Via aérea) > (Temperatura de Setup + 2°C) por mais de 5 min
Alarme de Baixa Temperatura	< (Temperatura de Setup – 2°C) por mais de 5 min
Alarme de Baixa Umidade / Falta de Água na Jarra	A quantidade de água na jarra é insuficiente para a umidificação do gás ou a umidade na saída da jarra está muito baixa.
Alarme de Falha do Umidificador	Indica que o equipamento está inoperante.
Alarme de Falha nos Sensores de Temperatura	Indica que o cabo dos sensores de temperatura (PROXIMAL e DISTAL) não está conectado ou que existe alguma falha.
Alarme de Falha do Circuito com Filamento Aquecido	Indica que o cabo do circuito de filamento aquecido não está conectado ao aparelho ou que apresenta danos.